






1. Fyld Novo Cuppen med den ønskede væske.

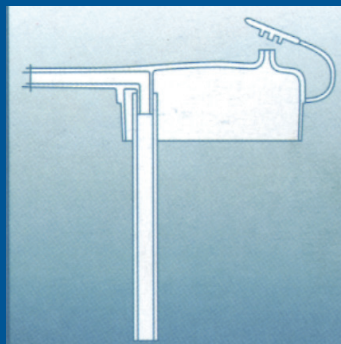

2. Sæt sugerøret helt omkring studsene på undersiden af koppen.

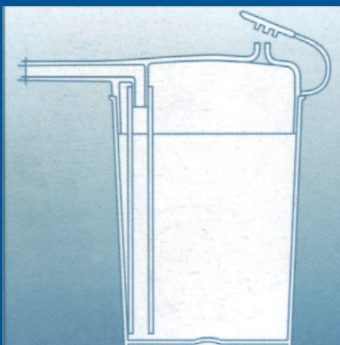

3. Advarsel! Ved varme drikke må proppen ikke sættes i udluftningshullet, før væsken er afkølet

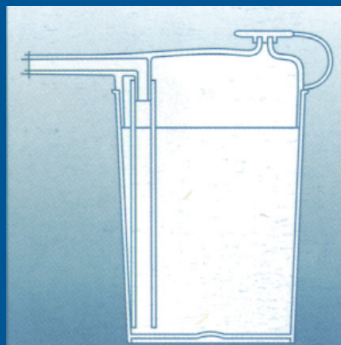

4. Luk udluftningshullet i låget ved at sætte proppen i. Er spildfri efter første sug.

NOVO CUP

For de sengeliggende som ønsker at være uafhængige af hjælp til at drikke.

Man kan uden besvær drikke liggende. Man har fuld kontrol over væskemængden og behøver ingen hjælp af hovedpuder eller hjælpere. Er ideel til personer som ikke selv kan bøje og løfte nakken.

- Er spild-sikker når den vælter, sparer skift af sengetøj
- Tåler varme og kolde væsker
- Transparent så indholdet ses
- Med måleskala, indeholder 250 ml væske
- Tåler opvaskemaskine, mikroovn og autoklave
- Er tidsbesparende for plejeren som kan undgå at løfte eller støtte patienternes hoved og optimerer dermed arbejdsituationen. Minimerer risici for ryg og muskelstræk

rikacare.dk



DS/EN ISO 9002 CERTIFIED

RIKA PLAST AS, Saunte Bygade 12, 3100 Hornbæk, Denmark
phone + 45 4975 0130 fax + 45 4975 0201, rika@rika.dk, rikacare.dk