



1
Nehmen Sie den Kolben aus dem Rohr. Senken Sie das Tuch nun in das Rohr ab und stopfen Sie das Ende nach.



2
Nutzen Sie Ihr Körpergewicht zum Herunterdrücken des Kolbens. Wiederholen Sie das einige Male.



3
Nehmen Sie das Wischtuch aus dem unteren Ende des Rohrs heraus.

Spültuch-Pressse

- für schwache Hände

- Easy Squeezey™ erleichtert die tägliche Arbeit mit dem Spültuch oder macht sie überhaupt erst möglich
- Leichte Handhabung für Personen mit schwachen oder schmerzenden Händen
- Verwendung direkt in der Küchenspüle
- Klein und handlich
- Spülmaschinentauglich

Wenn man schwache Hände hat, ist es oft problematisch, ein Spültuch auszuwringen und ohne ein feuchtes Spültuch ist es schwierig, die Küche ordentlich rein zu halten. Deshalb freuen wir uns, Ihnen den »Easy Squeezey« zu präsentieren, da er klein und leicht zu verwenden ist.

rikacare.dk

RIKA
CARE

DS/EN ISO 9001 CERTIFIED

RIKA PLAST AS, Saunte Bygade 12, 3100 Hornbaek, Denmark
Phone + 45 4975 0130 fax + 45 4975 0201, rika@rika.dk, rikacare.dk